

AUVOIN® HYDRO PLUS

AUVOIN® HYDRO PLUS kosteuttava nenäsuihke 20 ml

Auvoin Hydro Plus on nenäsumute, joka sisältää hyaluronihappoa, dekspantenolia (provitamiini B5) ja ksantaanikumiä fysiologisessa suolaliuoksessa. Tämä lääkinällinen laite muodostaa limakalvon päälle suojakalvon, joka auttaa palauttamaan luontaisen suojakerroksen sisältämänsä ksantaanikumin ansiosta. Kosteuttavien hyaluronihapon ja dekspantenolin ansiosta valmiste on ihanteellinen nenän limakalvojen kuivuuden ehkäisemiseen ja hoitamiseen. Tämä isotoninen suolaliuos sopii myös nuhan tukihoidon ja sen oireiden ehkäisyyn aikuisilla ja yli 1-vuotiailla lapsilla.

Koostumus:

Puhdistettu vesi, dekspantenoli (3 %), (provitamiini B5), natriumkloridi (0,9 %), kaliumdivetyfosfaatti, dikaliumvetyfosfaatti, ksantaanikumi (0,3 %), natriumhyaluroonaatti (0,2 %), EDTA-dinatriumsuolan dihydraatti, bentsalkoniumkloridi ja natriumhydroksidi.

Käyttöohjeet:

1. Ravista pulloa ennen käyttöä ja irrota suojakorkki. Ensimmäisellä käyttökerralla annostelijaa voi joutua painamaan useita kertoja, ennen kuin suihke alkaa muodostumaan.
 2. Aseta annostelija varovasti sieraimen ja annostele valmiste painamalla pumppua.
 3. Toista toiseen sieraimen.
 4. Puhdista kärki vedellä ja kuivaa se.
 5. Peitä annostelija suojakorkilla seuraavaan käyttökertaan saakka.
- Jos käytön aikana esiintyy merkittävää epämukavuutta, keskeytä hoito ja kysy neuvoa lääkäriltä.

Suosittelu annos:

Aikuiset ja vähintään 1-vuotiaat lapset: annostele molempiin sieraimiin niin usein kuin on tarpeen.

Vasta-aiheet ja haittavaikutukset:

- Suositelluilla hoitoannoksilla ei ole kuvattu haittavaikutuksia, mutta jos niitä esiintyy, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.
- Tähän valmisteeseen liittyvät haittatapahtumat on ilmoitettava valmistajalle, jakelijalle ja oman maasi kansalliselle terveysviranomaiselle.
- Ilmoitetuilla annoksilla ei ole tunnettuja yhteisvaikutuksia. On suositeltavaa kysyä lääkärin neuvoa myös silloin, jos käytät mitä tahansa lääkkeitä.

Varoitukset ja varoimet:

- Ei lasten ulottuville.
- Jos tiedät tai epäilet olevasi allerginen jollekin tämän lääkinällisen laitteen ainesosalle, sinun on varmuuden vuoksi syytä välttää sen käyttöä.
- Hygieniasyistä ja taudinaiheuttajien leviämisen ehkäisemiseksi samaa pakkausta saa käyttää vain yksi henkilö.
- Hyaluronihappo ei ole eläinperäistä. Sitä saadaan bakteerikäymisen tuloksena.

Säilytys ja viimeinen käyttöpäivämäärä:

- Älä käytä pakkaukseen ja pulloon painetun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Hävitä 3 kuukauden kuluttua ensimmäisestä avaamisesta.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Säilytä alle 40 °C:n lämpötilassa.
- Hävitä pullo ja suojakorkki vastaaviin säiliöihin.
- Pakkausta tai pakkauselostetta ei ole suositeltavaa hävittää valmisteen käytön aikana.

Tuotemuoto:

Sumute ilman ponnekaasua 20 ml:n pullossa, jossa on annostelija.

Kierrätys: Pullo ja korkki muovia, kotelo kartonkia ja pakkauseloste paperia.

Viimeisin tarkistusajankohta: 17.07.2024, Versio 04

Jakelija:

Oy Verman Ab
PL 164
01511 Vantaa



STE PHARMACEUTICALS, S.L.U.

Av. Universitat Autònoma, 13
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona – Espanja



REF PL0090



AUVOIN® HYDRO PLUS

AUVOIN® HYDRO PLUS återfuktande nässpray 20 ml

Auvoin Hydro Plus är en nässpray med hyaluronsyra, dexpanthenol (pro-vitamin B5) och xantangummi i en fysiologisk saltlösning. Denna medicinska produkt bildar en skyddande film över slemhinnan som hjälper till att återställa slemhinnans naturliga barriär tack vare dess innehåll av xantangummi. Dess innehåll av hyaluronsyra och dexpanthenol med fuktgivande egenskaper gör den idealisk för att förebygga och behandla torrhet i nässlemhinnan. Denna isotoniska saltlösning är lämplig för vuxna och barn från 1 års ålder för att förebygga symtom och som tilläggsbehandling vid rinitbehandling.

Innehåll:

Renat vatten, dexpanthenol (3 %) (pro-vitamin B5), natriumklorid (0,9 %), kaliumdihydrogenfosfat, dikaliumhydrogenfosfat, xantangummi (0,3 %), natriumhyaluronat (0,2 %), EDTA-dinatriumsalt-dihydrat, bensalkoniumklorid och natriumhydroxid.

Bruksanvisning:

1. Skaka flaskan före användning och ta av skyddslocket. Första gången den används kan det krävas att applikatorn trycks ned flera gånger tills du får fram en spraydusch.
2. För försiktigt in näsapplikatorn i ena näsborren och tryck på pumpen för att applicera produkten.
3. Upprepa proceduren med den andra näsborren.
4. Rengör spetsen med vatten och låt torka.
5. Stäng näsapplikatorn med skyddslocket till nästa användning.

Om betydande obehag uppträder under användningen ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Rekommenderad dosering:

För vuxna och barn från 1 år: applicera i varje näsborre så ofta som behövs.

Kontraindikationer och biverkningar:

- Inga biverkningar har beskrivits vid rekommenderade terapeutiska doser, men om du får biverkningar ska du kontakta din ordinarie läkare eller apotekspersonal.
- Alla allvarliga biverkningar i samband med denna produkt måste rapporteras till tillverkaren, distributören och den nationella hälsovårdsmyndigheten i ditt land.
- Vid den angivna doseringen finns det inga kända interaktioner. Du rekommenderas dock att rådgöra med din ordinarie läkare om du tar någon medicin.

Varningar och försiktighetsåtgärder:

- Förvara utom räckhåll för barn.
- Vid känd eller misstänkt allergi mot något av innehållet i denna medicinska produkt bör man som en försiktighetsåtgärd undvika att använda den.
- Av hygieniska skäl och för att förhindra överföring av patogener bör denna flaska inte användas av mer än en person.
- Hyaluronsyran är inte av animaliskt ursprung. Den framställs genom bakteriell fermentering.

Förvaring och utgångsdatum:

- Använd inte efter det utgångsdatum som anges på förpackningen och flaskan.
- Kassera 3 månader efter första öppnandet.
- Förvara svalt och torrt. Håll temperaturen under 40 °C.
- Deponera flaskan och skyddsskåpan i lämpliga avfallsbehållare.
- Det rekommenderas att inte kassera förpackningen eller bipacksedeln under produktens användningstid.

Beskrivning:

Spray utan drivgas i en 20 ml flaska med näsapplikator.

Återvinning: Burk och lock plast, förpackning kartong och bipacksedeln papper.

Senaste översyn: 17.07.2024, Version 04

Distributör:

Oy Verman Ab
PB 164
01511 Vanda



STE PHARMACEUTICALS, S.L.U.

Av. Universitat Autònoma, 13
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona – Spain



REF PL0090

