

Arianna® Baby-Vac

JOHDANTO

Nenän vuotaminen on melko yleistä pikkulapsilla ja vauvoilla. Yksi suurin ongelma on se, että pikkulapset eivät osaa niistää ja kestää jonkin aikaa, ennen kuin pikkulapsi tai vauva oppii hengittämään suun kautta. Nenän tukkoisuus vaikeuttaa hengittämistä, aiheuttaa huonon olon ja saattaa johtaa vakavampiin terveydellisiin ongelmiin nenässä, korvassa, kurkussa ja hengitysteissä. Siksi on erittäin tärkeää pitää nenäontelo puhtaana. Arianna® Baby-Vac™ nenäimuri on ehdottomasti paras ratkaisu tähän tarkoitukseen. Lääkärin tarkastusta ei tietenkään voi välttää, sillä vain lääkäri osaa diagnosoida oireen perussyyn. Eritteen poistaminen nenäontelosta edistää paranemista, helpottaa hengittämistä, parantaa yleistä hyvinvointia ja ehkäisee sairauksia.

Käyttöalue:

Laite on valmistettu lasten nenäeritteen poistamiseen! Ei saa käyttää muihin tarkoituksiin!

TÄRKEÄÄ:

Ensimmäinen käyttökerta

Huuhtelee laite huolellisesti ennen käyttöönottoa kuumalla juomavedellä. Älä liota desinfiointiainetta sisältävässä vedessä!

Puhdistaminen

Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen. Pese laite mahdollisuuksien mukaan välittömästi lapsi-/vauvaystävällisellä pesuaineella juoksevan veden alla. Huuhtelee kuumalla tai lämpimällä vedellä. Pyyhi imupään ulkopuoli pehmeällä kankaalla tai apteekista saatavalla desinfiointiaineella kostutetulla pumpulilla.

Älä käytä mitään muuta puhdistusainetta, kemikaalia tai hankaavaa materiaalia!

HUOMIO!

Ennen käyttöä, pyydä lääkärin mielipide hemofilian, usein toistuvan nenäverenvuodon ilmaantuessa!

Lopeta laitteen käyttö, jos laitteen käytön jälkeen lapsen nenään ilmaantuu allergista ihottumaa, punoitusta. Käännä lääkärin puoleen!

Jokaiselle lapselle on hyvä käyttää omaa imupäätä ja säilyttää ne merkittynä. Jos se ei ole mahdollista, puhdista imupää huolellisesti ennen käyttöä yllä olevan ohjeen mukaan.



VAROITUS!

- Käytä pölynimuria, jonka teho on 800 – 1800 wattia. (Turvallisen käytön todistavat mittauspöytäkirjat.) Ota huomioon pölynimurin käyttöohje.
- Baby-Vac nenäimuri ei ole leikkikalua. Laitetta saa käyttää aikuinen, sen jälkeen, kun on lukenut käyttöohjeet.
- Älä käytä laitetta muuhun, kuin mihin se on tarkoitettu tämän käyttöohjeen perusteella.
- Älä käytä laitetta, jos sen joku osa on vaurioitunut tai puuttuu.
- Pyyhi imupään (A) pää pehmeällä kankaalla tai apteekista saatavalla desinfiointiaineella kostutetulla pumpulilla. Älä käytä muita kemikaaleja!

VARASTOINTI:

Säilytä laite kuivassa, viileässä paikassa ja suoja laite suoralta auringonpaisteelta sekä hehkuvalta lämmöltä.

Arianna® Baby-Vac

KOKOONPANO:


1. Laita imupää (A) kiinni kerääjään (B).
2. Käynnistä kotitalouspölynimuri.
3. Liitä nenäimurin suutin (C) kiinni pölynimurin putkeen.

TOIMINTA:

1. Laitteen käyttö on tehokas luonnollisessa asennossa. Suosittelemme, että laitetta käyttävä aikuinen pitää vauvan imetysotteessa ja isompi lapsi puolestaan istutetaan syliin.
2. Laita imupää (A) lapsen sieraimen niin, että se täyttää koko sierainaukon ja pidä imupäätä sieraimessa muutaman sekunnin ajan. Tarkkaile samanaikaisesti, että limaa irtoaa kerääjään (B).
3. Toista edelliset toimenpiteet joko samassa tai toisessa sieraimessa.
4. Voit hellävaraisesti liikuttaa imupäätä 2. ja 3. vaiheen aikana nopeuttaaksesi toimenpidettä.
5. Nenäimurin aika on n. 5–5 sekuntia / sierainaukko.
6. Kun lopetat toimenpiteen, sammuta pölynimuri ja puhdista laite yllä mainittujen mukaan.
7. Toista toimenpide 2–3 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan.

Laitteen kestoikä on 3 vuotta. Voidaan käyttää turvallisesti, jos noudatetaan tässä käyttöohjeessa kuvattuja käyttöehtoja.

- A: Imupää
B: Kerääjä
C: Nenäimurin suutin

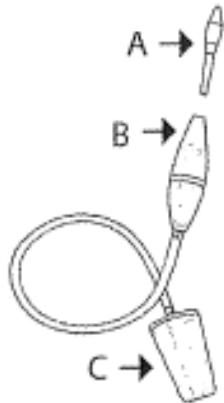

PURKU JA PUHDISTUS



1. Poista nenäimurin suutin (C) pölynimurista.
2. Kytke pölynimuri pois päältä.
3. Huuhtele osat A ja B välittömästi käytön jälkeen kuumalla juoksevalla vedellä ja pese ne yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
4. Anna kuivua roikkumalla esim. vesihan-
nan päällä.

Käytetyt merkit:

	Valmistajan nimi ja osoite
	Lue tämä käyttöohje!
	Varoitus!
LOT	Valmistusnumero
	Älä säilytä auringonpaisteessa
vOX	Tämän "käyttöohjeen" versionumero

CE 0123

Valmistajan nimi ja osoite:
Illés Csók és Társa Kft.
Budapest H-1146
Ajtósi Dürer sor 35.

Hyväksynyt:

Illés Csók Anna
Toimitusjohtaja

